

## Zestaw do naprawy zębów i koron (12 porcji)

PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE. PRZECHOWYWAĆ POZA DOSTĘPEM DZIECI.

**OSTRZEŻENIE:** Nie stosować w przypadku alergii na eugenol czy innych wymienionych składników. Wyrobu nie należy stosować w przypadku utrzymywania się rwącego bólu lub opuchlizny w miejscach dotkniętych schorzeniem. Natychmiast skonsultować się z dentystą. Produkt stosuje się jako wypełnienie tymczasowe (do 4 tygodni). W celu przeprowadzenia leczenia, należy skonsultować się jak najszybciej z dentystą. W przeciwnym razie może wystąpić zakażenie i/lub poważne powikłanie. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym pojemniku, dzięki czemu materiał pozostanie miękkim. Kod partii na opakowaniu. Nie stosować po dacie przydatności do użycia. Gdy wypadnie plomba, należy wykonać następujące czynności: Umyć ręce. Wypłukać ubytek w zębie ciepłą wodą. Nie osuszać, miejsce powinno być wilgotne. Użyć aplikatora do wyjęcia małej ilości materiału z fiolki, uformować palcami kulkę i mocno wcisnąć w miejsce ubytku. Usunąć materiał z palca poprzez pocieranie o krawędź zęba. Nie unosić palca prosto do góry, aby nie poluzować materiału w miejscu ubytku. Kilka razy zagryźć zęby, aby uzyskać właściwy zgryz. **ODCZEKAĆ 15 MINUT PRZED USUNIĘCIEM NADMIARU MATERIAŁU, ABY MATERIAŁ MÓGŁ SIĘ WSTĘPNIE USTABILIZOWAĆ.** Odczekać dwie (2) godziny na ustabilizowanie się materiału i w tym czasie nic nie jeść. Aby skleić luźne wypełnienie lub koronę: umyć ręce. Przygotować koronę poprzez staranne usunięcie możliwie jak największej ilości kleju z wnętrza korony. Dokładnie opłukać. Umyć i opłukać miejsce zęba wodą i pozostawić wilgotne. Przed nałożeniem nowego materiału dopasować koronę z powrotem na zębie. Sprawdzić, czy jest dobrze dopasowana. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, **NIE RÓB NIC DALEJ.** Umów się na wizytę do dentysty. Za pomocą aplikatora pobierz małą ilość materiału z fiolki. Umieść bardzo małą ilość materiału na wewnętrznej krawędzi odsłoniętego końca korony. Umieść koronę na wilgotnym zębie i mocno dociśnij. Kilka razy zagryźć zęby, aby je dobrze dopasować. Jeśli odczuwasz dyskomfort po zagryzieniu, usuń koronę i powtórz wszystkie kroki. **USUŃ NADMIAR MATERIAŁU. STARANNIE WYPŁUCZ WODĄ USTA.** Oczekaj przynajmniej dwie (2) godziny i w tym czasie nie jedz. Dentemp Premium Dental Repair można używać do naprawy mostu. Dentemp Premium Dental Repair nie należy używać na implantach ani wkładach koronowo-korzeniowych bez konsultacji z dentystą. Skład: Siarczan wapnia, siarczan baru, oktan eteru monoetylowego glikolu dietylenowego, tlenek cynku, eugenol, polimer metakrylanu etylu, siarczan potasu.